



بسمه تعالی

نام دستگاه : امحا زبانه

شماره اموال :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

معاونت درمان - مدیریت تجهیزات پزشکی

فرم نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان.....

روزهای ماه																												شاخص روزانه				
روز ۳۱	روز ۳۰	روز ۲۹	روز ۲۸	روز ۲۷	روز ۲۶	روز ۲۵	روز ۲۴	روز ۲۳	روز ۲۲	روز ۲۱	روز ۲۰	روز ۱۹	روز ۱۸	روز ۱۷	روز ۱۶	روز ۱۵	روز ۱۴	روز ۱۳	روز ۱۲	روز ۱۱	روز ۱۰	روز ۹	روز ۸	روز ۷	روز ۶	روز ۵	روز ۴		روز ۳	روز ۲	روز ۱	
																																تمیز نمودن سطوح خارجی دستگاه و صفحه نمایش با مواد شوینده (طبق توصیه شرکت سازنده)
																																شستشو سطوح داخلی و چمبر با محلول غیر اسیدی و صابونی تمیز و سپس با آب
																																بررسی آب ورودی از نظر فشار و سختی (طبق توصیه شرکت سازنده)
																																کنترل مسیر آب خروجی (از نظر گرفتگی و نشتی)
																																کنترل بخار و فشار هوای فشرده
																																بررسی فیلتر خروجی چمبر و نظافت آن
																																کنترل رکورد یا پرینتر از نظر کاغذ و قلم
																																یک سیکل خالی و تست شیمیایی انجام شود.
ماه سوم											ماه دوم											ماه اول						شاخص های هفتگی				
توضیحات				هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	توضیحات				هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	توضیحات		هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم											
																																بررسی اتصالات آب و بخار و هوای فشرده از نظر نشتی
																																بررسی فیلتر باد (روغن گیر و رطوبت گیر (دستگاه های پنوماتیک))
																																تخلیه ژنراتور بخار با فشار ۱ تا ۲ بار (طبق توصیه شرکت سازنده)
																																بررسی عملکرد دکمه emergency button
																																بررسی عملکرد و کنترل صدا و لرزش شیرهای برقی و پنوماتیک
																																انجام تست نشتی دستگاه
																																بررسی مخزن مولد بخار (توسط واحد فنی)
ماه سوم											ماه دوم											ماه اول						شاخص های ماهانه				
توضیحات				سالم	معیوب	توضیحات				سالم	معیوب	توضیحات		سالم	معیوب	توضیحات		سالم	معیوب													
																																کنترل سوپاپ اطمینان (طبق توصیه شرکت سازنده)
																																روان کاری قسمت های متحرک دستگاه (طبق توصیه شرکت سازنده)



بسمه تعالی

نام دستگاه : امحا زباله

شماره اموال :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

معاونت درمان - مدیریت تجهیزات پزشکی

فرم نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان.....

سه ماه اول			سه ماه دوم			سه ماه سوم			سه ماه چهارم			شاخص های سه ماهه
سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	
												بررسی واکسن دور درب و در صورت نیاز روانکاری و تعویض شود.
												سرویس تراپ (تله) های بخار (توسط واحد فنی)
شاخص های شش ماهه			شش ماه اول			شش ماه دوم						
سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	
												بررسی فیلترها و در صورت نیاز تعویض آنها (توسط شرکت سازنده)
												بررسی لوله کشی ها و تانک های آب از نظر پوسیدگی و نشتی
												نظافت صافی شیرها (توسط شرکت سازنده)
												تنظیم ترمومتر دمای محیط و دمای آب (مطابق با توصیه سازنده (در صورت وجود) و توسط واحد فنی)
شاخص های سالانه			یکسال									
سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	سالم	معیوب	توضیحات	
												بررسی و تکمیل مستندات و اقدامات انجام یافته در خصوص کالیبراسیون، سرویس جنرال، کنترل پمپ وکیوم و در صورت لزوم رسوب زدایی، شستشو المنت ها و سنسورهای مولد با اسید ضد رسوب و آچارکشی اتصالات برق (توسط شرکت سازنده) و کنترل کیفی توسط شرکت های دارای مجوز

توصیه ها

۱. در تمیز کردن سطوح از به کار بردن مواد ساینده خودداری نمایید.

۲. الزامات ورودی شیر آب:

* وجود مانومتر در ورودی آب برای بررسی فشار

* وجود دستگاه سختی سنج

* وجود شیر انشعاب جهت نمونه گیری

۳. واکسن دور درب را تمیز نمایید و از نظر زدگی و آسیب فیزیکی بررسی شود.

۴. از تنظیم سوییچ های فشار توسط کاربر خودداری گردد.

۵. سرویس تله بخار (طبق توصیه شرکت سازنده)

۶. تعویض فیلتر آنتی باکتریال (طبق توصیه شرکت سازنده)

* توجه: بررسی و تکمیل شاخص های روزانه بر عهده کاربر، شاخص های هفتگی بر عهده مسئول بخش مربوطه، شاخص های ماهانه و سالانه بر عهده کارشناس تجهیزات پزشکی مرکز می باشد.